

SAFE-ST ONE STEP WET WIPES SURFACE

• Desinfektionstücher (Vlies), vorgetränkt

- Kompakte Verpackung mit erhöhter Standfestigkeit für besonders einfache Handhabung
- Universelle, komfortable und zeitsparende Anwendung
- Einfache und schnelle „auf-den-Punkt“-Anwendung
- Für alle hygienisch sensiblen und patientennahen Bereiche geeignet



PRODUKTBESCHREIBUNG:

Safe-ST One Step Wet Wipes Surface ist ein gebrauchsfertiges Einweg-Vliestuchspender System mit einer alkoholischen Desinfektionslösung zur Desinfektion von nichtinvasiven Medizinprodukten sowie Flächen in patientennahen Bereichen. Ein Nachwischen der Fläche ist bei der Anwendung nicht erforderlich. Der besonders handliche und kompakte Einweg-Vliestuchspender ist einfach, sicher und effizient, sowie direkt einsatzbereit. Safe-ST One Step Wet Wipes Surface ist nur für die einmalige Anwendung bestimmt. Es benötigt keine Aufbereitung.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Gem. Medizinproduktegesetz (MPG): Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen, nichtinvasiven Medizinprodukten.

Gem. Biozidprodukteverordnung: Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen Flächen aller Art.

WIRKSPEKTRUM UND EINWIRKZEIT:

Flächendesinfektion (Wischdesinfektion), bakterizid, levurozid gem. VAH: 5 Min.; tuberkulozid (M.terrae): 30 Sek.; begrenzt viruzid PLUS (inklusive HBV, HIV, HCV), Rota-Viren: 30 Sek.; Noro-Viren (MNV): 1 Min.; Adeno-Viren: 3 Min.

ANWENDUNG:

Schutzdeckel öffnen. Schutzfolie des Vliestuchspenders abziehen. Das erste Tuch aus der Mitte der Tuchrolle herausziehen. Den vorderen Teil des Tuches durch die sternförmige Entnahmeöffnung ziehen. Den Schutzdeckel schließen und beim Verschließen darauf achten, dass das herausgezogene Tuch vollständig vom Schutzdeckel umschlossen ist. Oberflächen mit Safe-ST One Step Wet Wipes Surface abwischen. Hierbei auf vollständige Benetzung achten und Einwirkzeiten einhalten. Nicht geeignet für Acrylglas (PMMA).

Einwegsystem, eventuelle Restflüssigkeit entsorgen, den Spender mit offenem Entnahmedeckel zusammendrücken und dem Recycling zuführen.

ZUSAMMENSETZUNG:

100 g Tränkflüssigkeit enthalten: 45 g Ethanol (CAS: 64-17-5), enthält Duftstoffe.

BESONDERER HINWEIS:

Achtung: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. Nur für den professionellen Gebrauch.

HALTBARKEIT:

Halbbarkeit nach Anbruch der Packung: 42 Tage.

LISTUNGEN / PRODUKTSTATUS:

Aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste des VAH.

Registriert als Biozidprodukt bei der BAuA (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) gem. Biozidgesetz: BAuA Reg.-Nr.: N-80735

Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

DARREICHUNGSFORM:

Artikelnummer	Produktbeschreibung
9796318	120 Tücher - 17,5 x 36 cm

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.