

# SAFE-ST WET WIPES SURFACE POP UP SENSITIVE

- **Desinfektionstücher (Vlies), vorgetränkt**

- *Kein separates Spender-System mehr nötig*
- *Universelle, komfortable und zeitsparende Anwendung*
- *Einfache und schnelle „auf-den-Punkt“-Anwendung*
- *Für alle hygienisch sensiblen und patientennahen Bereiche geeignet*



## PRODUKTBESCHREIBUNG:

Safe-ST Wet Wipes Surface Pop Up Sensitive sind gebrauchsfertige, mit einer alkoholischen Desinfektionslösung getränkte Tücher zur Desinfektion von nichtinvasiven Medizinprodukten sowie Flächen in patientennahen Bereichen. Ein Nachwischen der Fläche ist bei der Anwendung nicht erforderlich. Die Tücher lassen sich einzeln aus der praktischen Packung mit wiederverschließbarem Deckel entnehmen.

## ANWENDUNGSGEBIETE:

Gem. Medizinproduktegesetz (MPG): Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen, nichtinvasiven Medizinprodukten.

Gem. Biozidprodukteverordnung: Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen Flächen aller Art.

## WIRKSPEKTRUM UND EINWIRKZEIT:

Flächendesinfektion (Wischdesinfektion), bakterizid, levurozid gem. VAH: 2 Min.; tuberkulozid (M.terrae): 30 Sek.; begrenzt viruzid PLUS (inklusive HBV, HIV, HCV), Rota-Viren: 30 Sek.; Noro-Viren (MNV): 1 Min.; Adeno-Viren: 3 Min.

## ANWENDUNG:

Oberflächen mit Safe-ST Wet Wipes Surface Pop Up Sensitive abwischen. Hierbei auf vollständige Benetzung achten und Einwirkzeiten einhalten.

## ZUSAMMENSETZUNG:

100 g Tränkflüssigkeit enthalten: 45 g Ethanol (CAS: 64-17-5), enthält Duftstoffe.

## BESONDERER HINWEIS:

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit

Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. Nur für den professionellen Gebrauch.

## HALTBARKEIT:

Haltbarkeit nach Anbruch der Packung: 3 Monate.

## LISTUNGEN / PRODUKTSTATUS:

Aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste des VAH.

Registriert als Biozidprodukt bei der BAuA (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) gem. Biozidgesetz: BAuA Reg.-Nr.: N-80736

Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

## DARREICHUNGSFORM:

Artikelnummer	Produktbeschreibung
9796319	80 Tücher - 20 x 22 cm

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.