

SAFE-ST WET WIPES SURFACE POP UP NON-ALCOHOLIC

- Desinfektionstücher (Vlies), vorgetränkt, alkoholfrei
- Kein separates Spender-System mehr nötig
- Universelle, komfortable und zeitsparende Anwendung
- Einfache und schnelle „auf-den-Punkt“-Anwendung
- Für alle hygienisch sensiblen und patientennahen Bereiche geeignet



PRODUKTBESCHREIBUNG:

Alkoholfreie, gebrauchsfertige Desinfektionstücher zur schnellen Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art, auch im medizinischen Bereich. Auf der Basis von quaternären Ammoniumverbindungen. Safe-ST System Wet Wipes Surface Pop Up non-alcoholic sind alkohol-, aldehyd- und phenolfrei. Durch die hohe, flusenfreie Materialqualität, garantierte Wirkstoffabgabe und gute Reinigungskraft eignen sich Safe-ST System Wet Wipes Surface Pop Up non-alcoholic besonders gut für alle professionellen Anwendungen. Die Tücher lassen sich einzeln aus der praktischen Packung mit dem wiederverschließbaren Deckel entnehmen.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Gem. Medizinproduktegesetz (MPG): Desinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichen nichtinvasiven Medizinprodukten.

Gem. Biozidprodukteverordnung (BPR): Zur Desinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichen Flächen aller Art.

WIRKSPEKTRUM UND EINWIRKZEIT:

Flächendesinfektion (Wischdesinfektion) bakterizid, levurozid gem. VAH: 1 Min.; wirksam gegen alle behüllten Viren gem. RKI Empfehlung inkl. HBV/HIV/HCV/Vaccinia/BVDV/Influenza-/Grippe-Viren: 30 Sek.; Rota-Viren: 30 Sek.; Papova/SV40-Viren: 2 Min.

ANWENDUNG:

Zu desinfizierende Fläche vollständig benetzen und über die Dauer der Einwirkzeit feucht halten. Nach Ablauf der Einwirkzeit ggf. mit einem Einmaltuch nachwischen.

ZUSAMMENSETZUNG:

100 g Tränkflüssigkeit enthalten: 0,5 g Alkyl (C12-16) Dimethylbenzylammoniumchlorid; 0,25 g Didecylidimethylammoniumchlorid.

BESONDERER HINWEIS:

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. Nur für den professionellen Gebrauch.

HALTBARKEIT:

Haltbarkeit nach Anbruch der Packung: 3 Monate.

LISTUNGEN / PRODUKTSTATUS:

Aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste des VAH.

Registriert als Biozidprodukt bei der BAuA (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) gem. Biozidgesetz: BAuA Reg.-Nr.: N-80737

Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

DARREICHUNGSFORM:

Artikelnummer	Produktbeschreibung
9796320	80 Tücher - 20 x 22 cm

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.