

## ***SPEIKO Prophylaxe-Pulver***

Mit Minzgeschmack

Inhalt 1 kg

### **Gebrauchsinformation:**

Zur Entfernung von hartnäckigen Belägen wie Tee-, Kaffee- und Raucherbelägen auf Zahnschmelz.

Für alle handelsüblichen Pulverstrahlgeräte geeignet. Bitte beachten Sie die Gebrauchsinformation der Gerätehersteller!

Durch eine optimierte Korngrößenverteilung ermöglicht das Pulver eine effektive Belagentfernung bei minimaler Abrasion.

Hauptkomponente Natriumhydrogencarbonat garantiert pharmakologische Unbedenklichkeit.

### **Gegenanzeigen:**

Freiliegendes Dentin und Schmelzkaries sollen durch das Wasser-Pulver-Luftgemisch nicht bestrahlt werden, da hier mit höheren Abrasionswerten zu rechnen ist.

Ebenfalls sollen Kompomer-, Komposit-, Amalgam- und Goldfüllungen nicht bearbeitet werden, da Aufrauhungen zu erwarten sind.

Der Wasser-Luft-Pulver-Strahl darf nicht auf das Zahnfleisch oder sonstige Weichgewebe gerichtet werden, auch ist ein Entfernen von Belägen oder Konkrementen in Zahnfleischtaschen kontraindiziert.

Nur für den zahnärztlichen Gebrauch

Nicht über 25°C lagern!

CE  
Art.-Nr. 1076

*Barcodelabel mit LOT  
und Eieruhr*